
 Manufacturer: Suretex  
Limited 31/1 Moo 4,  
Suratthani - Thakuapha  
Road, Tambon Khao Hua  
Kwal, Amphur Phunphin,  
Suratthani 84130, Thailand

 Importer: LifeStyles Europe  
SAS 4 - 6 Rue des Chauffours  
CS 70006 95095 Cergy Cedex,  
Frankreich

 Distributor: MAPA GmbH,  
Industriestraße 21–25, 27404  
Zeven, Germany,  
www.billy-boy.de

 EC REPRESENTATIVE: SXWell  
Belgium, Lenniksebaan 451/35  
1070 Anderlecht, BELGIUM

Artikel-Nr. 11.520.186

Rev. 10 (2024-06)

 Medizinprodukt  
(EU) No. 2017/745


**€2797**  
ISO 23409:2011

SKYN® und FEEL EVERYTHING™ sind eingetragene Marken der LifeStyles  
Healthcare Pte Ltd.

## WICHTIGE HINWEISE


BILLY BOY SKYN Kondome

Verwendungszweck: zur Empfängnisverhütung und zum Schutz  
vor sexuell übertragbaren Krankheiten.

 Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig durchlesen.

Kondome sind grundsätzlich vorsichtig zu behandeln.

Kondome kühl , trocken  und vor Hitze  und direkter  
Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Beachten Sie bitte das auf der Verpackung und den Siegelbriefchen  
angegebene Haltbarkeitsdatum  - nach Ablauf sollte das Kondom nicht  
mehr verwendet werden!

BILLY BOY SKYN Kondome sind aus Polyisopren hergestellt.

BILLY BOY SKYN Kondome sind frei von Naturkautschuklatex und ge-  
eignet für Menschen mit einer bekannten oder vermutlichen Latexallergie.

Bei Beschwerden oder Reizungen verwenden Sie das Kondom nicht weiter  
und fragen Sie bitte Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin um Rat.

Jedes Kondom wird einzeln elektronisch geprüft. Die richtige Verwendung  
von Kondomen senkt das Risiko einer ungewollten Schwangerschaft und  
Ansteckung mit Geschlechtskrankheiten wie HIV/AIDS. Kondome bieten einen  
wirksamen Schutz vor Schwangerschaft und Geschlechtskrankheiten. Aber  
wie bei allen Verhütungsmitteln kann ein 100%iger Schutz nicht garantiert  
werden. Falls Sie ungeschützten Geschlechtsverkehr haben oder falls das  
Kondom während des Gebrauchs reißen oder platzen sollte, suchen Sie  
bitte schnellstmöglich, jedoch innerhalb von 72 Stunden, einen Arzt bzw.  
eine Ärztin auf. Bitte melden Sie alle schwerwiegenden Vorfälle in Bezug  
auf das Produkt dem Hersteller und Ihrer zuständigen nationalen Behörde.  
Genießen Sie Haut-an-Haut Gefühl mit BILLY BOY SKYN Hautnah.

Das latexfreie Material Polyisopren ist besonders anschiemgsam und lässt  
euch das einmalige Hautnah-Gefühl erleben.

# BILLY BOY

## GEBRAUCHSHINWEISE



## VORSICHT

Gefahr bei Wiederverwendung von Kondomen: Kreuzinfektion,  
Unchtigkeit durch Reinigung, Verlust der Gleitfähigkeit und eine  
erhöhte Gefahr des Reißens.

Alle diese Faktoren erhöhen das Risiko einer Schwangerschaft oder  
der Übertragung einer Geschlechtskrankheit.

Bei manchen hochempfindlichen Personen können Inhaltsstoffe  
dieser Kondome allergische Reaktionen auslösen.

Tritt eine Reizung oder ein Brennen auf, stellen Sie den Gebrauch  
dieses Kondoms ein und suchen Sie einen Arzt bzw. eine Ärztin auf.  
Verwenden Sie keine auf Öl basierten Gleitmittel, wie Massageöl,  
Körperlotionen, Babyöl, Butter, Margarine, Vaseline usw., da  
Polyisopren-Kondome durch ölhaltige Substanzen beschädigt  
werden können.

Falls Sie Gleitmittel verwenden, müssen diese als für den Gebrauch  
mit Kondomen geeignet ausgewiesen sein.

Vor der Anwendung von Gleitmitteln bitte die Gebrauchshinweise  
auf der Verpackung beachten.

Keine Gleitmittel direkt auf den Penis oder die Innenseite des  
Kondoms auftragen, hierdurch erhöht sich das Risiko, dass das  
Kondom abrutscht oder reißt.

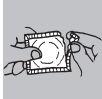
Nicht vaginale Verwendung von Kondomen, d.h. Oralsex  
(da die Zähne das Kondom beschädigen können) und Analsex  
(da es an natürlicher Gleitfähigkeit mangeln kann), erhöht das  
Abrutsch- und Beschädigungsrisiko.

Bei Verwendung von Scheidenzäpfchen bitte die jeweilige  
Gebrauchsanweisung beachten.

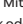
Werden im Bereich von Penis und Vagina rezeptpflichtige oder  
rezeptfreie Medikamente (Salben, Gele) angewendet, fragen  
Sie bitte Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin oder Ihren Apotheker bzw.  
Ihre Apothekerin nach der Verträglichkeit des Medikaments mit  
Kondomen.

Vor jedem Wechsel der Sexualpraktiken (vaginal, anal, oral) oder  
Partner bzw. Partnerinnen immer ein neues Kondom verwenden.

1.



Die Siegelfolie vorsichtig an einer der Zacken öffnen. Die Siegelfolie kann so sauber aufgerissen werden, ohne das Kondom zu beschädigen.

Vorsicht: Mit scharfkantigen Gegenständen, Schmuck oder spitzen Fingernägeln könnten Sie das Kondom beschädigen. Ist das Haltbarkeitsdatum abgelaufen oder die Verpackungsfolie  beschädigt, nicht das darin befindliche Kondom, sondern ein anderes mit einer unbeschädigten Verpackungsfolie verwenden. Verwenden Sie nie mehr als ein Kondom auf einmal.

2.



Halten Sie das Reservoir so mit Daumen und Zeigefinger fest, dass dort kein Luftpolster entsteht, um Raum für das Auffangen des Spermazus zu schaffen. Im Reservoir eingeschlossene Luft erhöht das Risiko einer Beschädigung des

Kondoms. Ziehen Sie die Vorhaut komplett zurück und rollen Sie das Kondom vom Reservoir her vollständig über den steifen Penis, bevor es zur ersten Berührung zwischen Penis und Körper des Partners bzw. der Partnerin kommt. Prüfen Sie die korrekte Position des Kondoms. Rollen Sie es dann bis zur Peniswurzel ab. Nur so kann das Kondom bei der Verhinderung von sexuell übertragbaren Infektionen und von Schwangerschaft unterstützend wirken. Lässt sich das Kondom nicht leicht abrollen, ist die Abrollrichtung falsch. Verwenden Sie ein neues Kondom und beachten Sie die Abrollrichtung. Wenn Sie merken, dass das Kondom abrutscht oder spannt, prüfen Sie es auf eventuelle Beschädigungen, da dies zu einem Riss führen kann.


3.

Ziehen Sie nach der Ejakulation und vor Erschlaffung des Glied vorsichtig aus der Vagina. Zur Vermeidung eines Auslaufens des











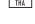







Spermazus halten Sie das Kondom an der Basis fest. Drücken Sie den Penis nach unten und entfernen Sie das Kondom.

4.

Verknöten Sie das gebrauchte Kondom, wickeln Sie es in ein Papiertuch und entsorgen Sie es hygienisch. Nicht in die Toilette werfen. Waschen Sie Penis und Hände, bevor Sie mit dem Liebespiel fortfahren. Kondome sind ausschließlich für den Einmalgebrauch  bestimmt!

## HINWEISSYMBOL

	Gebrauchsanleitung
	Kondome sind ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt!
	Kondome nicht verwenden, wenn die Verpackungsfolie beschädigt ist. Gebrauchshinweise beachten
	Kondome vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
	Kondome trocken lagern
	Kondome kühl lagern
	Haltbarkeitsdatum
	Chargennummer Kondome
	Chargennummer Packung
	Medizinprodukt
	Artikelnummer Packung
	Hersteller
	Herstellerland
	Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft
	Importer
	Distributor